

## BRUKSANVISNING SPECIALTILLVERKADE ANORDNINGAR

### AVSEDD ANVÄNDNING

Dynamiska ankelortoser (DAFO®) erbjuder ett externt stödsystem för att sammanrikta foten, ankeln och smalbenet till en optimal position för normala dagliga aktiviteter för patienter med ett antal olika medicinska tillstånd, inklusive:

- Neurologiska eller neuromuskulära problem
- Försenad utveckling
- Cerebral pares
- Spina bifida
- Downs syndrom
- Muskeldystrofi
- Post-polio
- Huvud- och ryggradsskador
- Stroke

### SAKER ATT VARA UPPMÄRKSAM PÅ

Efter en inledande period av två eller tre veckors intermittent användning, vänjer patienter sig snabbt vid att bära stöden hela tiden. Klagomål gällande obehag, särskilt efter att patienten burit stödet komfortabelt under en tid, kan signalera behov att justera det. Om det gäller ett barn kan det hända att det vuxit ur stödet. Viss rodnad, särskilt under ankelremmen, är vanligt och beror på mängden av muskelanspänning som kontrolleras av stödet. Röda märken eller tecken på irritation som inte försvinner inom 20 minuter efter det att stödet har tagits bort kan tyda på passformsproblem och kräva åtgärder. Avbryt användning och informera omedelbart din läkare om detta inträffar.

### DAFO CARE

Cascade® dynamiska ankelortoser tillverkas av ett antal olika plaster, beroende på den utvalda stödmodellen. De är tunna och tånjbara, men ändå slitstarka vid normal användning. Dynamiska ankelortoser bör bäras ovanpå lämpliga strumpor (vi rekommenderar en bomulls- och syntetblandning av medeltjocklek), och med skor. Revor eller svår repning, särskilt på underdelen, kan leda till stressfrakturer i plasten. Att inte bära skor ovanpå stödet utanför behandlingstid gör att garantin slutar gälla.

Ankelortoser bör inspekteras regelbundet för slitage, sprickor och ojämna kanter. Efter sex till tolv månaders användning rekommenderar vi att stödet utvärderas för passform och slitage av läkaren.

Rengör ankelortoserna med en svamp eller mjuk borste med mild tvål och vatten. Torka med handduk och låt sedan lufttorka ordentligt under några timmar. Använd inte värme.

Vi rekommenderar förvaring av anordningen på avstånd från extrem hetta och kyla. I kalla temperaturer kan anordningarna bli spröda och mer mottagliga för stressfrakturer. Undvik att plötsligt bryta upp stödet när det är mycket kallt.

Om ett formgjutet ”instegsinlägg” levereras med ankelortosen, ska detta bäras under ovan-/framkanterna av stödet vid övergångsområdet mellan fot och ben. Detta inlägg är konstruerat för att skydda mot klämning och håller foten på plats i stödet, vid behov.

Alla remmar tjänar specifika syften. För bästa resultat, spänn var och en ordentligt.

### LÄMPLIGA SKOR

I allmänhet passar en sko som är bredare vid tårna, kanske en storlek eller två större än normalt, bäst med ett stöd. Det rekommenderas att hitta den kortaste skon där stödet får plats. Detta kommer att minska bärarens tendens att snubbla på tårna. Ett mer flexibelt skomaterial kommer att tånjas mer och anpassas efter den extra bredd som krävs. Vi rekommenderar att inläggssulan i skon tas bort efter inköp för att ytterligare öka volymen. Ett ganska kraftigt tryck krävs för att få stödet ända ner till skoslutet.

Om du har svårt att hitta skor som passar, har vår webbplats [www.dafo.com](http://www.dafo.com) länkar till tillverkare som konstruerar skor särskilt för användning med ankelortoser.

### HELTÄCKANDE (90-dagars) GARANTI

Våra dynamiska ankelartosers passform, material och utförande garanteras i nittio (90) dagar med början fjorton (14) dagar efter leveransdatum. Under den tiden kommer vi att efter eget gottfinnande justera, reparera eller byta ut stödet om problem uppstår. Garantiperioden på nittio (90) dagar finns för att lämna gott om tid för tillpassning och felsökning. Vi rekommenderar att boka tid för tillpassning inom två veckor från mottagande av stöden.

Garantin gäller inte vid missbruk, onödigt slitage eller förlust. Detta innefattar att inte bära skor över stöden vid gång (förutom under behandlingstillfällen) och/eller förstörelse på grund av externa faktorer såsom värme, kyla, stötar eller obefogat slitage bortom normal användning.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar från land till land.




#### DAFO-bärare/förälder-vårdnadshavare för DAFO-bärare:

Diskutera frågor som du kan ha gällande passform och/eller utförande av stöden med din **läkare**. Läkaren kommer att bedöma stödet för att avgöra huruvida en enkel justering löser problemet, eller om en mer omfattande åtgärd är nödvändig.

#### DAFO-utövare:

Om det finns ett problem som kräver justering, reparation eller byte av benstödet inom garantiperioden, vänligen kontakta den part du köpte produkten från innan du vidtar några åtgärder. Om produkten köptes via en distributör, vänligen kontakta dem. Efter att ha samlat in specifik information om det eller de problem som upplevs kommer de att hjälpa till att avgöra det mest effektiva sättet att åtgärda problemet och instruera dig gällande eventuella åtgärder som du kan behöva ta. Om du har köpt direkt via Cascade Dafo kan du kontakta vår kundtjänst på: +1 800 848 7332 (internationellt: +00 1 360 543 9306) eller via e-post på: [customersupport@dafo.com](mailto:customersupport@dafo.com).

#### Förklaring av symboler

Symbol	Förklaring
	Tillverkare
	Auktoriserad representant i Eurpoa
<b>SN</b>	Serienummer
	Varning! Konsultera medföljande dokument
<b>MD</b>	Medicinteknisk product

**SPECIALTILLVERKAD ANORDNING**

**ENDAST PÅ ORDINATION AV LÄKARE**

	<p>Cascade Dafo, Inc. 1360 Sunset Avenue Ferndale WA 98248-8913 United States of America Tel: +1 360 543 9306 Fax: +1 360 384 4558</p>		<p>Freyr Life Sciences GmbH Marie-Curie-Straße 8, D-79539 Lörrach, Tyskland</p>	<p><b>SPECIALTILLVERKAD ANORDNING ENDAST PÅ ORDINATION AV LÄKARE</b></p>	
---	--	---	---	--	---