

BRUKSANVISNING

FAST FIT®- ANORDNINGAR

AVSEDD ANVÄNDNING

Cascade Dafos prefabricerade Fast Fit-anordningar erbjuder ett externt stödsystem för att sammanrikta foten, ankeln och smalbenet till en optimal position för normala dagliga aktiviteter för patienter med ett antal olika medicinska tillstånd, inklusive:

- Neurologiska eller neuromuskulära problem
- Försenad uveckling
- Cerebral pares
- Downs syndrom

SAKER ATT HA KOLL PÅ

Efter en första veckas användning anpassar patienter sig snabbt till att använda benstöd eller fotinlägg. Eventuella klagomål om obehag, särskilt efter det att patienten med bekvämlighet har använt sig av benstöd/fotinlägg under en tid, bör meddelas till vår kundtjänst. Om det gäller ett barn kan detta vara en signal på att patienten har vuxit ur benstödet. Eventuella röda märken eller tecken på irritation som inte går bort inom 20 minuter efter att benstödet/fotinlägget har tagits bort kan indikera ett problem gällande passform som kräver åtgärd. Avbryt användandet och informera omedelbart din läkare eller kontakta Cascades kundtjänst på 1-800-848-7332 (internationellt +00 1 360 543 9306).

UNDERHÅLL

Cascades produkter tillverkas av ett antal olika plaster, beroende på den utvalda modellen. De är tunna och tånjbara, men ändå slitstarka vid normal användning. Produkterna bör bäras ovanpå lämpliga strumpor (vi rekommenderar en bomulls- och syntetblandning av medeltjocklek), och med skor. Om man bär de anordningar utan skor, kan det orsaka revor eller svår repning, särskilt på underdelen, och det kan leda till stressfrakturer i plasten. När bärs utan skor, tåhyllan kan bli fastna i mattor och andra ojämna ytor och skapa en utlösningss fara. Att inte bära skor ovanpå stödet utanför behandlingstid gör att garantin slutar gälla.

Produkterna ska inspekteras regelbundet för slitage, sprickor och ojämna kanter. Bär alltid ett tvådelade stödet, med en innersko inuti den yttre ramen. Efter sex till tolv månaders användning rekommenderar vi att stödet utvärderas för passform och slitage av läkaren.

Rengör anordningarna med en svamp eller mjuk borste med mild tvål och vatten. Torka med handduk och låt sedan lufttorka ordentligt under några timmar. Använd inte värme.

Vi rekommenderar förvaring av Fast Fit-anordningen på avstånd från extrem hetta och kyla. I kalla temperaturer kan anordningarna bli spröda och mer mottagliga för stressfrakturer. Undvik att plötsligt bryta upp stödet när det är mycket kallt.

Om en rem eller special vaddering levereras med anordningen så tjänar den ett specifikt syfte. För bästa resultat, spänn varje rem ordentligt och hålla alla specialt vaddering på plats när du använder anordningen.

LÄMPLIGA SKOR

I allmänhet passar en sko som är bredare vid tårna, kanske en storlek eller två större än normalt, bäst med ett stöd eller skoinlägg. Det rekommenderas att hitta den kortaste skon där stödet får plats. Detta kommer att minska bärarens tendens att snubbla på tårna. Ett mer flexibelt skomaterial kommer att tänjas mer och anpassas efter den extra bredd som krävs. För att klara av stödets eller skoinläggets volym rekommenderar vi att skons inläggssula tas bort efter inköp. Ett ganska kraftigt tryck krävs för att få stödet ända ner till skoslutet.

Om du har svårt att hitta skor som passar, har vår webbplats www.dafo.com länkar till tillverkare som konstruerar skor särskilt för användning med ankelortoser.

FULL (90 dagars) GARANTI





Våra prefabricerade anordningars passform, material och utförande garanteras i nittio (90) dagar med början fjorton (14) dagar efter leveransdatum. Under den tiden kommer vi att efter eget gottfinnande justera, reparera eller byta ut stödet eller inlägget om problem uppstår. Garantiperioden på nittio (90) dagar finns för att lämna gott om tid för tillpassning och felsökning. Om anordningen levereras av en läkare rekommenderar vi att tillpassningstillfället sker inom de två första veckorna efter mottagande.




Garantin gäller inte vid missbruk, onödigt slitage eller förlust. Detta innefattar att inte bära skor över stöden och/eller förstörelse på grund av externa faktorer såsom värme, kyla, stötar eller obefogat slitage bortom normal användning.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar från land till land.

Om det finns ett problem som kräver att Cascade reparerar eller byter benstödet under garantiperioden, vänligen meddela vår kundtjänst innan du vidtar några åtgärder. Efter att ha samlat in specifik information om det eller de problem som upplevs kommer de att hjälpa till att avgöra det mest effektiva sättet att åtgärda problemet, och instruera dig gällande eventuella åtgärder som du kan behöva ta. Du kan nå kundtjänst via e-post på: customersupport@dafo.com eller telefon: +1 800 848 7332 (internationellt: +00 1 360 543 9306).

Förklaring av symboler

Symbol	Förklaring
	Tillverkare
	Auktoriserad representant i Eurpoa
	Varning! Konsultera medföljande dokument
	Medicinteknisk product

	<p>Cascade Dafo, Inc. 1360 Sunset Avenue Ferndale WA 98248-8913 United States of America Tel: +1 360 543 9306 Fax: +1 360 384 4558</p>		<p>Freyr Life Sciences GmbH Marie-Curie-Straße 8, D-79539 Lörrach, Tyskland</p>	
---	--	---	---	---